




URESTREAM®

ユリストリーム 尿管バイパスチューブ

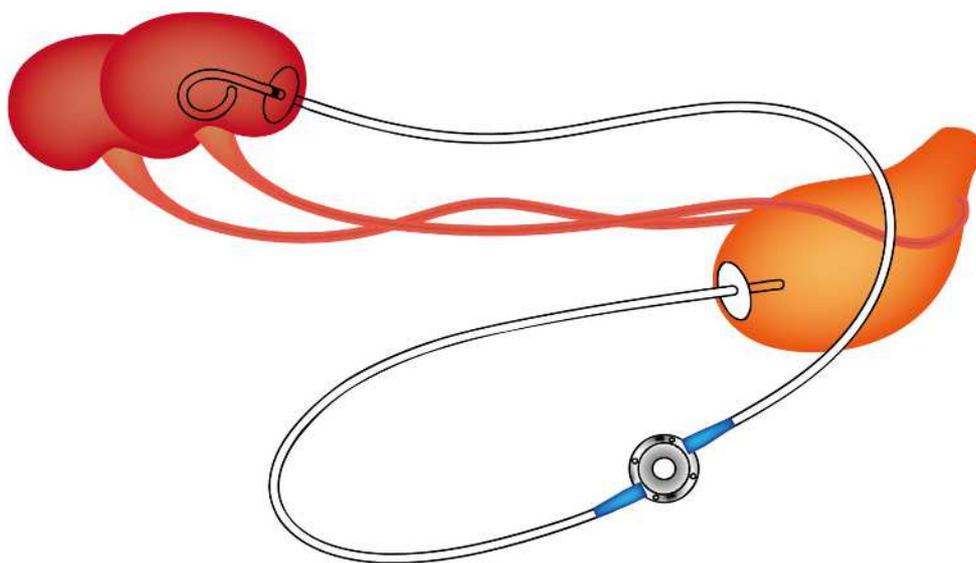

(分離型 有ポートキット)

ユリストリーム尿管バイパスチューブは、猫・小型犬の尿管狭窄や尿流の低下に対応し、腎臓と膀胱間の尿の排出を補助することを目的としています。また、分離型有ポートキットは、ポートを介して留置したチューブ内部を経皮的にフラッシュすることが可能です。

有限会社オーキッド 2025


<https://okid.jp/>

ユリストリーム 尿管バイパスチューブ（分離型 有ポートキット）

ユリストリーム 尿管バイパスチューブは、チューブの両端を腎臓と膀胱に挿入し、腎臓から膀胱への尿の流れを補助します。

本キットは、腎瘻チューブ部と膀胱瘻チューブ部に分かれており、それぞれ腎臓と膀胱に留置後、ポートを介して接続し、一体の尿管バイパスチューブとして機能します。

チューブは、留置中の患畜の体動や臓器の位置変化に伴うテンションを吸収するため、特徴的な滑らかなカーブを描くように配置されます。

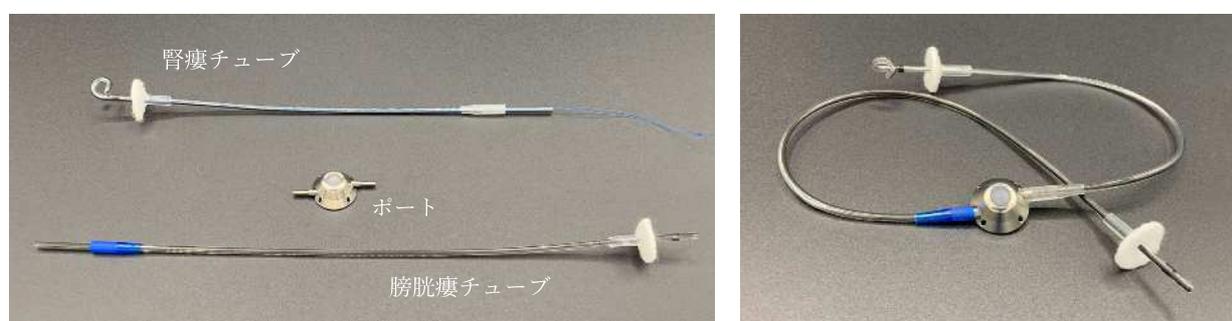

また、留置中のチューブの閉塞を防ぐため、ヒューバー針を用いて、皮下に設置したポートのセプタムから経皮的にチューブ内部をフラッシュすることができます。





キット構成

キット構成には、「標準キット」と「両側用キット」の2種類があります。

標準キットは、片側の腎臓と膀胱を接続し、1本の尿管をバイパスする構成です。

一方、両側用キットは、両側の腎臓と膀胱の3点をY字に接続し、両側の尿管を同時にバイパスする構成となります。

両側尿管のバイパスが必要な場合、左右それぞれに標準キットを設置する方法が推奨されますが、両側用キットは麻酔時間の短縮に有効な選択肢です。

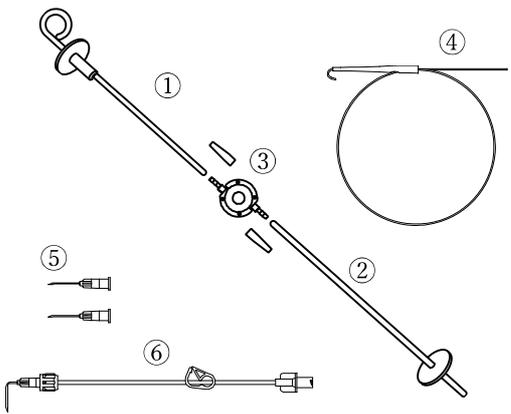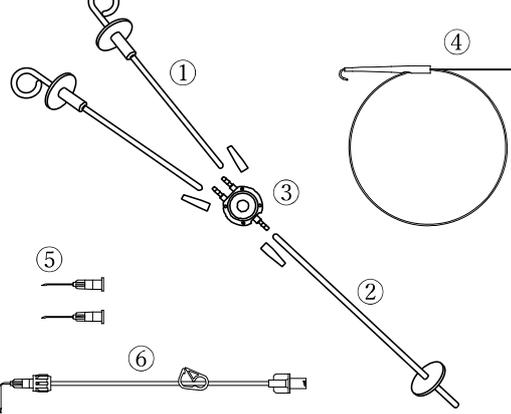標準キット Standard Kit	両側用キット Bilateral Kit
	
<ul style="list-style-type: none"> ① 腎瘻チューブ ② 膀胱瘻チューブ ③ 2ウェイポート ④ 0.035"×45cm Jチップガイドワイヤ ⑤ 22G ヒューバー針 (×2個) ⑥ 22G ヒューバー注入セット 	<ul style="list-style-type: none"> ① 腎瘻チューブ (×2セット) ② 膀胱瘻チューブ ③ 3ウェイポート ④ 0.035"×45cm Jチップガイドワイヤ ⑤ 22G ヒューバー針 (×2個) ⑥ 22G ヒューバー注入セット
<p>KIT# US-K07LP / US-K07SP</p>	<p>KIT# US-BK07LP / US-BK07SP</p>

※キットには「18G/16G 静脈留置針」と「滅菌済シアノアクリレート系組織接着剤」は含まれません。

腎瘻チューブ

腎瘻チューブは、造影ライン入りの 7Fr クリアチューブで、先端形状の異なる「ループタイプ」と「ストレートタイプ」の 2 タイプがあります。


腎臓への挿入は、0.035 インチ J チップガイドワイヤを用いてセルジンガー法で行います。チューブには挿入時に用いる金属カニューラが予め挿入されています。

腎臓挿入部の基端には造影マーカーが付与されています。このマーカーは最終側孔の位置を示すもので、チューブはこのマーカーまで腎盂内に挿入する必要があります。


マーカーの少し手元側に取り付けられた円盤状のポリエステルカフは可動式で、患畜の腎臓に合わせてチューブ挿入長を調整し、チューブを腎被膜に固定するために使用します。

※このカフの移動は硬いため、挿入前に長さを決め、予め適切な位置に移動しておく必要があります。

ループ腎瘻チューブセット (PART# US-NT07L)

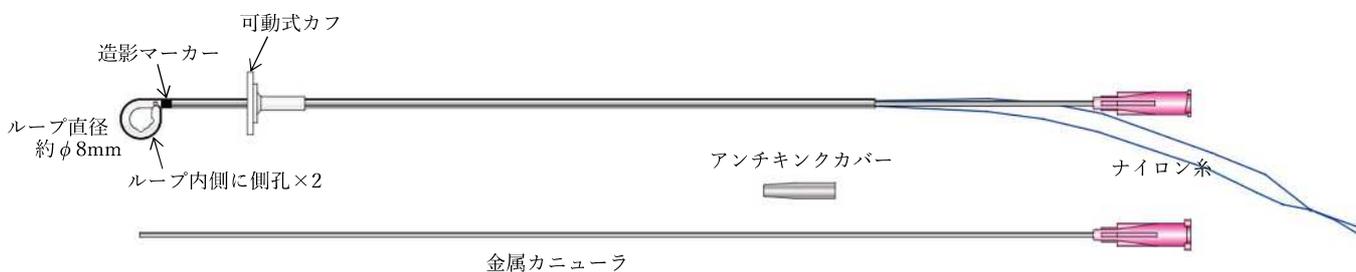

ストレート腎瘻チューブセット (PART# US-NT07S)

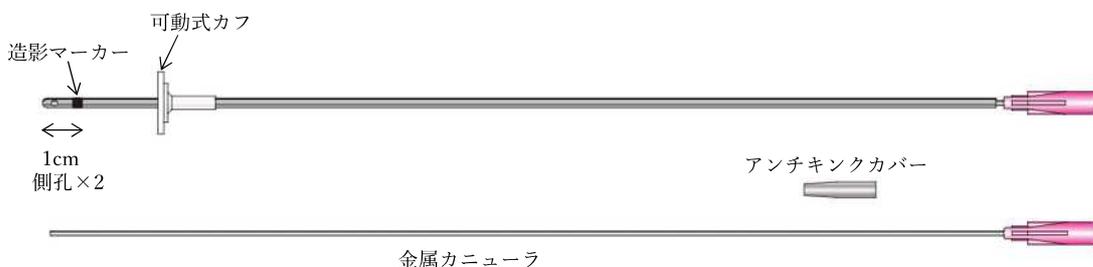

膀胱瘻チューブ


膀胱瘻チューブは、造影ライン入りのオーバーザニードル方式の 7Fr クリアストレートチューブです。チューブには膀胱刺入時に用いるシャープスタイレットと金属カニューラが予め挿入されています。

腎瘻チューブと同様に、先端から 1cm の位置に造影マーカが付与されています。このマーカは最終側孔の位置を示し、チューブはこのマーカまで膀胱内に挿入する必要があります。

円盤状のポリエステルカフは、腎瘻チューブと同様に可動式であり、患畜の膀胱サイズに応じてチューブ挿入長を調整し、チューブを膀胱漿膜に固定するために使用します。

※カフの移動は硬いため、挿入前に長さを決め、適切な位置に移動しておく必要があります。

膀胱瘻チューブセット (PART# US-CT07A)

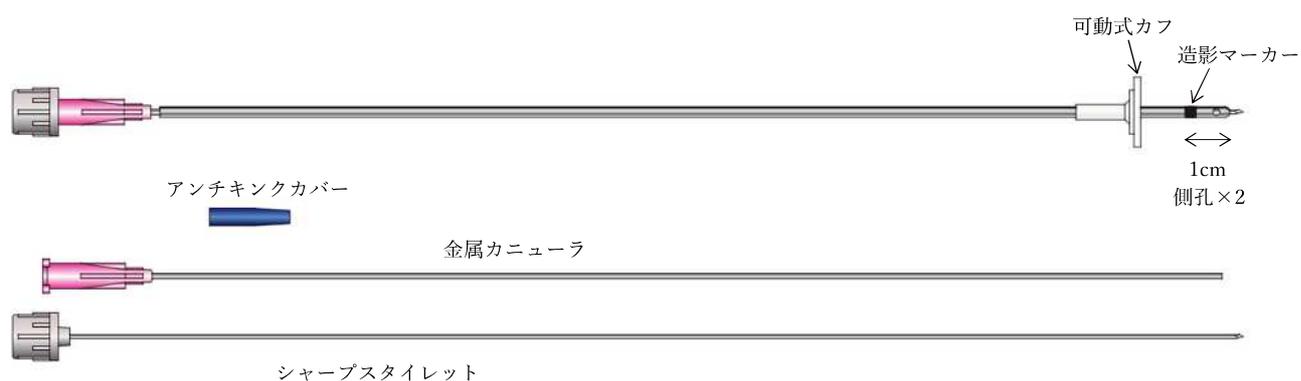


ポート

チューブを詰まりなく維持するためにはチューブ内のフラッシュや、尿をサンプリングして分析・培養する必要があります。本キットはポートを通して鎮静剤や麻酔を用いずにエコーガイド下にこれらを行うことができます。

チタン製ポートの天面には圧縮シリコンゴム製のセプタムが埋め込まれています。腹部の触診で皮下のポートを探り当て、セプタム部を専用の針（ヒューバー針）で穿刺してチューブ内部のフラッシュや尿サンプルの採取を行います。

皮下に設置したポートの断面図

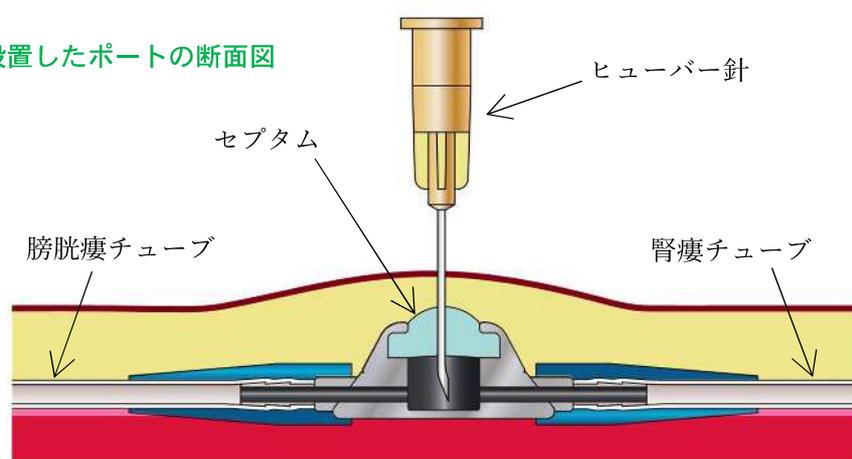

2 ウェイポート

PART# US-2WP



直 径 : ϕ 18mm
高 さ : 約 10mm
セプタム径 : 約 ϕ 6mm

3 ウェイポート

PART# US-3WP



直 径 : ϕ 20mm
高 さ : 約 10mm
セプタム径 : 約 ϕ 6mm


品目リスト

ユリストリーム 尿管バイパスチューブ (分離型 有ポート)

希望小売価格 (税抜)

US-K07LP

7Fr ループチューブキット

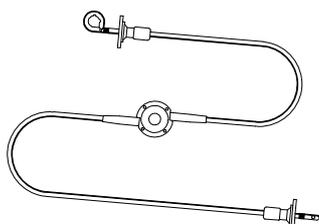


- ・ 7Fr ループ腎瘻チューブ
- ・ 7Fr 膀胱瘻チューブ
- ・ 2 ウェイポート
- ・ 0.035 インチ×45cm J チップガイドワイヤ
- ・ 22G ヒューバー針 (×2 個)
- ・ 22G ヒューバー注入セット

56,000 円

US-K07SP

7Fr ストレートチューブキット

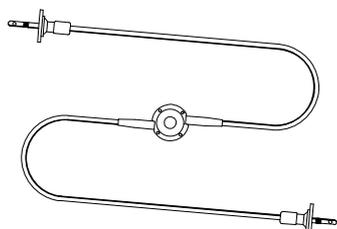


- ・ 7Fr ストレートチップ腎瘻チューブ
- ・ 7Fr 膀胱瘻チューブ
- ・ 2 ウェイポート
- ・ 0.035 インチ×45cm J チップガイドワイヤ
- ・ 22G ヒューバー針 (×2 個)
- ・ 22G ヒューバー注入セット

54,500 円

US-BK07LP

7Fr 両側用ループチューブキット

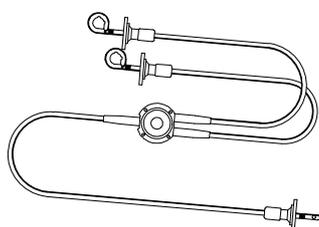


- ・ 7Fr ループ腎瘻チューブ (×2 セット)
- ・ 7Fr 膀胱瘻チューブ
- ・ 3 ウェイポート
- ・ 0.035 インチ×45cm J チップガイドワイヤ
- ・ 22G ヒューバー針 (×2 個)
- ・ 22G ヒューバー注入セット

73,000 円

US-BK07SP

7Fr 両側用ストレートチューブキット

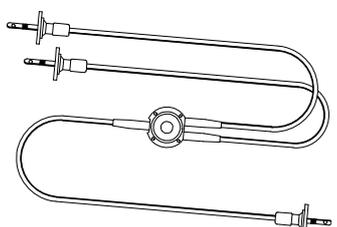


- ・ 7Fr ストレートチップ腎瘻チューブ (×2 セット)
- ・ 7Fr 膀胱瘻チューブ
- ・ 3 ウェイポート
- ・ 0.035 インチ×45cm J チップガイドワイヤ
- ・ 22G ヒューバー針 (×2 個)
- ・ 22G ヒューバー注入セット

70,000 円

※滅菌済シアノアクリレート系組織接着剤の取り扱いはございません。

※2%テトラ EDTA 溶液、タウロリジン・クエン酸溶液などのロックソリューションの取り扱いはございません。

品目リスト（付属品の単品取扱）

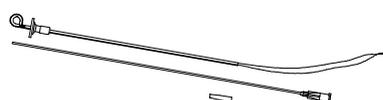「ユリストリーム 尿管バイパスチューブ」の付属品		希望小売価格(税別)
US-NT07L ループ腎瘻チューブセット	 <ul style="list-style-type: none"> ・7Fr ループ腎瘻チューブ ・金属カニューラ ・アンチキンクカバー 	14,000 円
US-NT07S ストレート腎瘻チューブセット	 <ul style="list-style-type: none"> ・7Fr ストレート腎瘻チューブ ・金属カニューラ ・アンチキンクカバー 	12,500 円
US-CT07A 膀胱瘻チューブセット	 <ul style="list-style-type: none"> ・7Fr 膀胱瘻チューブ ・金属カニューラ ・シャープスタイレット ・アンチキンクカバー 	13,000 円
US-2WP 2 ウェイポート	 <ul style="list-style-type: none"> ・2 ウェイタンポート ・アンチキンクカバー（×2 個） 	26,000 円
US-3WP 3 ウェイポート	 <ul style="list-style-type: none"> ・3 ウェイタンポート ・アンチキンクカバー（×3 個） 	29,000 円
US-GW Jチップガイドワイヤ	 0.035 インチ×45cm Jチップ	2,000 円
HN-22S ヒューバー針（5 本入り）	 22G×19mm 直針（×5 個）	1,750 円
HN-22RS ヒューバー注入セット（5 本入り）	 22G×19mm アングル針 +延長チューブ（×5 個）	3,500 円

お問い合わせ先



kind
 安心 親切 丁寧

株式会社カインド
 代表取締役 蟹江謙介
 〒224-0001 神奈川県横浜市都筑区中川1-19-1 中川SOE*W3FA
 TEL 045-548-9195 FAX 045-548-9196